

ALMOHADA VISCO PUR

Almohada sanitaria de espuma viscoelástica



Características

- Disponible en: 75, 80, 90, 105, 135 y 150 cm.
- El núcleo es de espuma viscoelástica.
- Espuma fabricada mediante sistema de célula abierta que garantiza su transpirabilidad, favorece la ventilación y evita la acumulación de humedad y el posible crecimiento de microorganismos.
- Funda fabricada en un material de fácil limpieza con un alto grado de impermeabilidad y transpirabilidad con tratamiento antibacteriano e ignífugo.
- Funda interior de punto..

Descripción

Almohada fabricada con espuma viscoelástica de alta densidad que, gracias a sus propiedades termosensibles (se ablanda con la temperatura corporal) se adapta a la cabeza del paciente en cualquier posición.

Tanto su diseño, como las propiedades físicas de las espumas, permiten un reparto equilibrado de las presiones ejercidas sobre la piel en los puntos de apoyo, contribuyendo al confort del paciente y a la prevención de úlceras por presión (UPP).

La funda es impermeable, transpirable, con tratamiento antibacteriano e ignífugo y de fácil limpieza, e incluso desinfectable.

Existe la versión cervical en 70 cm

Indicaciones:

- Para cualquier tipo de paciente.
- No existe limitación de peso del paciente.

Dimensiones

Ancho: 43 cm

Largo: 75, 80, 90, 105, 135 y 150 cm

Grosor: 13 cm

Núcleo

Espuma viscoelástica de 50 kg

Fundas

- Funda interior textil.
- Funda exterior de Poliuretano bielástica.
- Poliuretano con base de poliéster.
- Impermeable.
- Ignífuga.
- Fungicida "bio-pruf"
- Antibacterias.
- Transpirable.
- Cremallera lateral.

Lavado de la funda

- Lavado a máquina hasta 95°C máximo
- Resistente a ciertos desinfectantes: a base de amonio cuaternario, alcohol desnaturalizado 90%, éter 2% y etanol 70%
- Secado en tambor máximo 70°C
- No utilizar lejía
- No lavar en seco
- No planchar

Almacenaje

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a una temperatura de entre 5 y 40 °C

Uso y Mantenimiento

- Periódicamente ventilar el núcleo sacándolo de la funda exterior.
- Por sus características la espuma viscoelástica es más blanda en verano que en invierno, por ello se aconseja mantener una temperatura estable en la habitación.
- Limpiar periódicamente la funda.
- El núcleo se puede lavar en agua sin sacarlo de su funda protectora interior. Secarlo al aire sin sol directo.
- Procurar no atrapar el núcleo o la tela al utilizar la cremallera.

Caducidad

Las características intrínsecas del producto no se alteran con el tiempo.

El proceso de oxidación es un proceso natural que sufren las espumas, causada por el oxígeno presente en el aire o por la luz y provoca que la espuma adquiera un color amarillento con el tiempo, pero este proceso no supone ninguna merma de las propiedades del producto

Se puede reducir procurando protegerlo con la funda el mayor tiempo posible.

Garantía

2 años ante cualquier defecto de fabricación. No válida si el uso o el mantenimiento del colchón no se hacen siguiendo las indicaciones de las presentes instrucciones o si el propietario permite que personas no autorizadas hagan uso incorrecto del mismo.

Clase CE

I, no estéril. Trazabilidad mediante número de lote.

Otras certificaciones

Certificado Oeko Tex Standard 100 clase I para espuma y funda

Fabricante

GERIALINE SOLUTIONS

P.I. La Cartuja – Tecnum nave 22

50720- La Cartuja Baja – Zaragoza – España

****Licencia fabricante sanitario Nº 6054 PS**